

# MAGLUMI® PCT (CLIA)

## ■ USO PREVISTO

El kit es un inmunoensayo de quimioluminiscencia *in vitro* para la determinación cuantitativa de PCT en suero y plasma humanos con el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie MAGLUMI y el Sistema Integrado de la serie Biolumi. El ensayo se utiliza como complemento en el diagnóstico de individuos en los que se sospechan o se han confirmado enfermedades por infecciones bacterianas.

## ■ RESUMEN

La PCT es una precursora de 116 aminoácidos de la hormona calcitonina, producida por las células C de la tiroides<sup>1-3</sup>, y su masa molecular es de 13 KDa<sup>2,4</sup>. La PCT en sí misma está compuesta por tres secciones: el extremo amino (conocido como amino PCT), calcitonina inmadura y péptido-1 carboxiterminal de calcitonina (CCP-1, también llamado katacalcina). La calcitonina madura (32 AA) se produce a partir de la calcitonina inmadura al truncar la glicina de su carboxiterminal y después de la amidación por la encima monooxigenasa peptidilglicina alfa-amidante. Se encuentran bajas concentraciones de PCT, calcitonina madura, CCP-1, calcitonina-CCP-1 y otros péptidos relacionados en la circulación periférica de individuos sanos<sup>5</sup>.

La PCT se utiliza como biomarcador para el diagnóstico de sepsis, sepsis grave y choque séptico<sup>6</sup>. Junto con los criterios clínicos (como SIRS) y procedimientos microbiológicos, la determinación de la concentración en suero de PCT parece ser un método prometedor para la identificación rápida de pacientes con infección grave<sup>7</sup>. La demostración de concentraciones altas de PCT sin incremento de calcitonina en pacientes con infección bacteriana grave es un hallazgo médico reciente en humanos<sup>8</sup>. El inicio y la discontinuación guiada por procalcitonina de la terapia antibiótica es un nuevo método utilizado para reducir el uso excesivo de antibióticos. Esto es esencial para disminuir el riesgo de efectos secundarios y la emergente multiresistencia bacteriana<sup>9,10</sup>. Se ha descubierto en múltiples estudios que la PCT es un marcador confiable de distintas infecciones bacterianas. En comparación con otros marcadores de infección, la PCT es más específica para infecciones bacterianas, lo que ayuda a médicos a distinguir entre enfermedades bacterianas y no bacterianas. Esto puede ser particularmente importante en pacientes bajo tratamiento con corticosteroides sistémicos por la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y choque séptico. Además, la producción de PCT no depende de los glóbulos blancos en sí mismos y los niveles de PCT aumentan cuando ocurre una infección bacteriana sistémica en pacientes neutropénicos<sup>11</sup>.

## ■ PRINCIPIO DE LA PRUEBA

Inmunoensayo de quimioluminiscencia tipo sándwich.

La muestra, el ABEI marcado con anticuerpo monoclonal anti-PCT, el tampón y las microperlas magnéticas recubiertas con el anticuerpo monoclonal anti-PCT se mezclan bien, se incuban y se dejan reaccionar para formar complejos tipo sándwich. Después de la precipitación en un campo magnético, el sobrenadante se decanta y, luego, se realiza un ciclo de lavado. Posteriormente, se agrega el iniciador 1 + 2 para iniciar una reacción quimioluminiscente. La señal luminosa se mide con un fotomultiplicador como unidades de luz relativas (RLU), que es proporcional a la concentración de PCT presente en la muestra.

## ■ REACTIVOS

### Contenido del kit

Componente	Descripción	100 pruebas por kit	50 pruebas por kit	30 pruebas por kit
<b>Microperlas magnéticas</b>	Microperlas magnéticas recubiertas con anticuerpo monoclonal anti-PCT (~8,00 µg/mL) en el tampón PBS, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	2,5 mL	1,5 mL	1,0 mL
<b>Calibrador bajo</b>	Una baja concentración del antígeno de PCT en el tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
<b>Calibrador alto</b>	Una alta concentración del antígeno de PCT en el tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
<b>Tampón</b>	Tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	6,5 mL	4,0 mL	3,0 mL
<b>Marca de ABEI</b>	ABEI marcado con anticuerpo monoclonal anti-PCT (~111 ng/mL) en el tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	7,5 mL	4,5 mL	3,3 mL
<b>Diluyente</b>	Suero bovino, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	5,5 mL	3,5 mL	3,5 mL
<b>Control 1</b>	Una baja concentración del antígeno de PCT (0,500 ng/mL) en el tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
<b>Control 2</b>	Una alta concentración del antígeno de PCT (10,0 ng/mL) en el tampón Tris-HCl, NaN <sub>3</sub> (<0,1 %).	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

Todos los reactivos se entregan listos para usarse.

### Advertencias y precauciones

- Para usarse en diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- Siga las precauciones habituales requeridas para manipular cualquier reactivo de laboratorio.
- Se deben tomar medidas de protección personal para evitar que alguna parte del cuerpo entre en contacto con las muestras, los reactivos y los controles. Se deben cumplir con los requisitos de operación locales del ensayo.
- Se requiere una técnica hábil y el cumplimiento estricto del prospecto del envase para obtener resultados fiables.
- No utilice el kit después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.
- No intercambie componentes entre diferentes reactivos o lotes.
- Evite la formación de espuma en todos los reactivos y tipos de muestras (muestras, calibradores y controles).
- Todos los residuos asociados con muestras biológicas, reactivos biológicos y materiales desechables utilizados para el ensayo deben considerarse potencialmente infecciosos y deben desecharse en conformidad con las recomendaciones locales.
- Este producto contiene azida de sodio. La azida de sodio puede reaccionar con las tuberías de plomo o cobre para formar azidas metálicas altamente explosivas. Inmediatamente después de desecharlo, enjuague con un gran volumen de agua para evitar la acumulación de azida. Para obtener información adicional, consulte las hojas de datos de seguridad disponibles para usuarios profesionales a pedido.

Nota: Si ha ocurrido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que usted se encuentre.

### Manipulación del reactivo

- Para evitar la contaminación, use guantes limpios cuando trabaje con un kit de reactivos y una muestra. Cuando manipule el kit de reactivos, reemplace los guantes que estuvieron en contacto con muestras, ya que la contaminación de muestras generará resultados poco fiables.
- No utilice el kit en condiciones de mal funcionamiento; por ejemplo, el kit se filtró en la película de sellado o en otro lugar, aparece turbiedad o precipitación obvias en los reactivos (excepto en el caso de las microperlas magnéticas) o el valor de control está fuera del rango especificado reiteradamente. Si el kit se encuentra en condiciones de mal funcionamiento, comuníquese con Snibe o con nuestro distribuidor autorizado.
- Para evitar la evaporación del líquido en los kits de reactivos abiertos en el refrigerador, se recomienda que los kits de reactivos abiertos se sellen con los sellos de reactivos que se encuentran en el embalaje. Los sellos de los reactivos son de uso único. Si se necesitan sellos adicionales, comuníquese con Snibe o con nuestro distribuidor autorizado.
- En el transcurso del tiempo, los líquidos residuales pueden secarse en la superficie septal. Estos son, generalmente, sales secas y no tienen ningún efecto sobre la eficacia del ensayo.
- Utilice siempre el mismo analizador para un reactivo integral abierto.
- Para obtener instrucciones sobre cómo mezclar microperlas magnéticas, consulte la sección Preparación del Reactivo de este prospecto.
- Para obtener más información acerca del manejo de reactivos durante el funcionamiento del sistema, consulte las Instrucciones de operación del analizador.

### Almacenamiento y estabilidad

- No congele los reactivos integrales.
- Almacene el kit de reactivos en posición vertical para garantizar una disponibilidad total de las microperlas magnéticas.
- Proteja de la exposición directa a la luz solar.

Estabilidad de los reactivos	
Sin abrir a una temperatura de entre 2 y 8 °C	hasta la fecha de caducidad indicada
Abierto a una temperatura de entre 2 y 8 °C	6 semanas
En el sistema	4 semanas
Estabilidad de los controles	
Sin abrir a una temperatura de entre 2 y 8 °C	hasta la fecha de caducidad indicada
Abierto a una temperatura de entre 10 y 30 °C	6 horas
Abierto a una temperatura de entre 2 y 8 °C	6 semanas
Congelado a -20 °C	3 meses

Ciclos de congelado y descongelado	no más de 3 veces
------------------------------------	-------------------

## ■ PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS

### Tipos de muestra

Solo las muestras que se indican a continuación se probaron y se consideraron aceptables.

Tipos de muestra	Tubos de recolección
Suero	Tubos sin aditivo ni accesorios, o tubos que contengan activador de coagulación o activador de coagulación con gel.
Plasma	K2-EDTA

• Los tipos de muestras detallados se probaron con una selección de tubos de obtención de muestras disponibles en el mercado en el momento de la evaluación (es decir, que no se probaron todos los tubos disponibles de todos los fabricantes). Los materiales de los sistemas de recolección de muestras pueden variar según el fabricante, lo cual podría afectar los resultados de las pruebas en algunos casos. Siga cuidadosamente las instrucciones de los fabricantes de los tubos cuando utilice los tubos de recolección.

### Estado de las muestras

- No utilice muestras inactivadas por calor, ni muestras burdamente hemolizadas/muestras con hiperlipidemia ni muestras con contaminación microbiana evidente.
- Asegúrese de que la formación completa de coágulos en las muestras de suero haya tenido lugar antes de la centrifugación. Algunas muestras de suero, en particular las de los pacientes que reciben un tratamiento anticoagulante o trombolítico, podrían presentar un tiempo de coagulación mayor. Si la muestra sérica se centrifuga antes de que se complete la coagulación, la presencia de fibrina podría producir resultados erróneos.
- Las muestras deben estar libres de fibrina y otras partículas.
- Para prevenir la contaminación cruzada, se recomienda usar pipetas o puntas de pipeta desechables.

### Preparación para el análisis

- Inspeccione todas las muestras para detectar espuma. Elimine la espuma con un aplicador antes del análisis. Para evitar la contaminación cruzada, utilice un aplicador nuevo para cada muestra.
- Las muestras congeladas deben descongelarse completamente antes de mezclarlas. Mezcle las muestras descongeladas completamente por agitación a baja velocidad o invirtiendo el contenido con suavidad. Inspeccione visualmente las muestras. Si se observan capas o estratificación, mezcle hasta que las muestras estén visiblemente homogéneas. Si las muestras no se mezclan completamente, es posible que se obtengan resultados incoherentes.
- Las muestras no deben contener fibrina, glóbulos rojos ni otros tipos de material particulado. Estas muestras pueden dar resultados fiables y deben centrifugarse antes de realizar la prueba. Transfiera la muestra clarificada a un vaso de muestra o tubo secundario para la prueba. Para las muestras centrifugadas con una capa lipídica, transfiera solo la muestra clarificada y no el material lipídico.
- El volumen de muestra necesario para una sola determinación de este ensayo es 10 µL.

### Almacenamiento de muestras

Las muestras extraídas del separador, los glóbulos rojos o los coágulos pueden almacenarse hasta 24 horas a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C, 48 horas a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C o hasta 12 meses congeladas a -20 °C. Se han evaluado muestras congeladas sometidas a hasta 3 ciclos de congelación/descongelación.

### Transporte de muestras

- Envase y etiquete las muestras en conformidad con las regulaciones locales vigentes relacionadas con el transporte de sustancias infecciosas y muestras clínicas.
- No exceda las limitaciones de almacenamiento indicadas anteriormente.

### Dilución de las muestras

- Las muestras, con concentraciones de PCT por encima del intervalo de medición analítica, se pueden diluir con diluyente, ya sea mediante el protocolo de dilución automatizado o el procedimiento de dilución manual. El índice de dilución recomendado es 1:8. La concentración de la muestra diluida debe ser >12,5 ng/mL.
- Para diluir manualmente, multiplique el resultado por el factor de dilución. Para diluir con los analizadores, el software del analizador considera automáticamente la dilución en el cálculo de la concentración de la muestra.

## ■ PROCEDIMIENTO

### Materiales proporcionados

Ensayo de PCT (CLIA), etiquetas de control con código de barras.

### Materiales necesarios (pero no proporcionados)

- Equipo de laboratorio general.
- Analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus, MAGLUMI X8, MAGLUMI X3, MAGLUMI X6 o Sistema Integrado Biolumi 8000, Biolumi CX8.
- Los accesorios adicionales de la prueba requeridos para los analizadores mencionados anteriormente incluyen: módulo de reacción, iniciador 1 + 2, concentrado de lavado, control de luz, punta y vaso de reacción. Las especificaciones de accesorios y los accesorios específicos para cada modelo se refieren a las Instrucciones de operación del analizador correspondiente.
- Utilice los accesorios especificados por Snibe para garantizar la fiabilidad de los resultados de las pruebas.

### Procedimiento de ensayo

#### Preparación del reactivo

- Saque el kit de reactivos de la caja e inspeccione visualmente los viales integrales para detectar fugas en la película hermética o en cualquier otro lugar. Si no hay fugas, rompa la película selladora con cuidado.
- Abra la puerta del área de reactivos; sostenga la manija del reactivo para acercar la etiqueta RFID al lector RFID (durante aproximadamente 2 segundos); el zumbador emitirá un pitido; un pitido indica que la detección se realizó correctamente.
- Mantenga el reactivo introducido hasta el fondo a través del riel de reactivos vacío.
- Observe si la información del reactivo se muestra correctamente en la interfaz del software; de lo contrario, repita los dos procedimientos anteriores.
- La resuspensión de las microperlas magnéticas se realiza de forma automática cuando el kit se carga correctamente, de modo que las microperlas magnéticas se vuelvan a suspender totalmente de forma homogénea antes del uso.

#### Calibración del ensayo

- Seleccione el ensayo que se va a calibrar y ejecute la operación de calibración en la interfaz del área de reactivos. Para obtener información específica sobre la modificación de las calibraciones, consulte la sección de calibración de las Instrucciones de operación del analizador.
- Repita la calibración según el intervalo de calibración establecido en este prospecto.

#### Control de calidad

- Cuando se utilice un nuevo lote, compruebe o edite la información del control de calidad.
- Escanee el código de barras de control, seleccione la información de control de calidad correspondiente y ejecute las pruebas. Para obtener información específica sobre las modificaciones de control de calidad, consulte la sección de control de calidad de las Instrucciones de operación del analizador.

#### Pruebas de muestra

- Después de cargar la muestra con éxito, selecciónela en la interfaz, edite el ensayo para la muestra que se va a analizar y ejecute la prueba. Para obtener información específica sobre la modificación de las muestras de pacientes, consulte la sección sobre la modificación de muestras de las Instrucciones de operación del analizador.

Para garantizar el correcto rendimiento de la prueba, siga estrictamente las Instrucciones de operación del analizador.

### Calibración

Trazabilidad: este método se estandarizó de acuerdo con el estándar de referencia interna de Snibe.

La prueba de calibradores específicos de ensayo permite que los valores de unidades relativas de luz (RLU) detectados se ajusten a la curva principal.

Se recomienda repetir la calibración de la siguiente manera:

- Siempre que se utilice un nuevo lote de reactivo o el iniciador 1 + 2.
- Cada 28 días.
- El analizador recibió servicio técnico.
- Los valores de control están fuera del rango especificado.

### Control de calidad

Se recomienda efectuar controles con el fin de determinar los requisitos de control de calidad para este ensayo; estos deben ejecutarse de manera individual para controlar el rendimiento del ensayo. Consulte las pautas publicadas para obtener recomendaciones generales de control de calidad; por ejemplo, la pauta C24 del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute) u otras pautas publicadas<sup>12</sup>.

Se recomienda realizar un control de calidad una vez por cada día de uso o, de acuerdo con los requisitos de acreditación o las regulaciones locales y los procedimientos de control de calidad de su laboratorio, el control de calidad se puede realizar mediante el ensayo del Ácido Hialurónico (PCT):

- Siempre que el kit esté calibrado.
- Siempre que se use un nuevo lote de iniciador 1 + 2 o de concentrado de lavado.

Los controles solo son aplicables con los sistemas MAGLUMI y Biolumi; y solo se utilizan en concordancia con los mismos siete primeros números de LOTE de los reactivos correspondientes. Consulte la etiqueta para obtener información sobre cada valor objetivo y rango.

Se debe evaluar el rendimiento de otros controles para determinar su compatibilidad con este ensayo antes de utilizarlos. Se deben establecer rangos de valor adecuados para todos los materiales de control de calidad utilizados.

Los valores de control deben estar dentro del rango especificado; cada vez que alguno de los controles se encuentre fuera del rango especificado, se debe repetir la calibración y se deben volver a probar los controles. Si los valores de control se encuentran repetidamente fuera de los rangos predefinidos después de una calibración exitosa, no se deben informar los resultados del paciente y se deben realizar las siguientes acciones:

- Verifique que los materiales no hayan caducado.
- Verifique que se haya realizado el mantenimiento necesario.

- Verifique que el ensayo se haya realizado de acuerdo con el prospecto del envase.
  - Si es necesario, comuníquese con Snibe o con nuestros distribuidores autorizados para obtener asistencia.
- Si los controles del kit no son suficientes para el uso, solicite más controles de PCT (CLIA) (REF: 160201471MT) a Snibe o a nuestros distribuidores autorizados.

## ■ RESULTADOS

### Cálculo

El analizador calcula automáticamente la concentración de PCT en cada muestra mediante una curva de calibración que se genera con un procedimiento de curva principal de calibración de 2 puntos. Los resultados se expresan en ng/mL. Para obtener más información, consulte las Instrucciones de operación del analizador.

### Interpretación de los resultados

El intervalo esperado para el ensayo para PCT se obtuvo a partir de 535 personas aparentemente sanas en China; se obtuvo el siguiente valor esperado:

≤0,05 ng/mL (percentil 95).

Un estudio realizado en muestras de 152 individuos con Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS, por sus siglas en inglés), 139 con sepsis y 135 con sepsis grave o choque séptico en China demostró lo siguiente:

<0,5 ng/mL está asociado a un bajo riesgo de progresión a sepsis grave o choque séptico;

>2,0 ng/mL está asociado a un alto riesgo de progresión a sepsis severa o choque séptico.

Los resultados pueden diferir entre laboratorios debido a variaciones en la población y el método de prueba. Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio intervalo de referencia.

### ■ LIMITACIONES

- Los resultados se deben analizar junto con los antecedentes médicos del paciente, el examen clínico y otros hallazgos.
- Si los resultados del Ácido Hialurónico (PCT) no coinciden con la evidencia clínica, hay que realizar una prueba adicional para confirmar el resultado.
- Las muestras de pacientes que hayan recibido preparaciones de anticuerpos monoclonales de ratón para diagnóstico o tratamiento podrían contener anticuerpos humanos antirratón (HAMA, human anti-mouse antibody). Estas muestras podrían dar valores erróneamente elevados o bajos cuando se prueban con los kits de ensayo que emplean anticuerpos monoclonales de ratón<sup>13,14</sup>. Es posible que se requiera información adicional para el diagnóstico.
- Los anticuerpos heterófilos en suero humano pueden reaccionar con inmunoglobulinas reactivas e interferir con inmunoensayos *in vitro*. Los pacientes que están habitualmente expuestos a animales o productos de suero para animales pueden ser propensos a esta interferencia y se pueden observar valores anómalos<sup>15</sup>.
- La contaminación bacteriana o la inactivación por calor de las muestras pueden afectar los resultados de la prueba.
- Se pueden observar niveles elevados de PCT en afecciones que no sean infecciones bacterianas sistémicas. Estas podrían incluir, pero no están limitadas a, politraumatismo, quemaduras, cirugías complicadas y choque cardiogénico<sup>6</sup>.

### ■ CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ESPECÍFICAS

En esta sección se proporcionan datos de rendimiento representativos. Los resultados obtenidos en laboratorios individuales pueden variar.

#### Precisión

La precisión se determinó mediante el ensayo, las muestras y los controles en un protocolo (EP05-A3) del CLSI (Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio): duplicados en dos ejecuciones independientes por día durante 5 días en tres sitios diferentes utilizando tres lotes de kits de reactivos (n = 180). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Muestra	Media (ng/mL) (n = 180)	Dentro de la ejecución		Entre ejecuciones		Reproducibilidad	
		SD (ng/mL)	% de CV	SD (ng/mL)	% de CV	SD (ng/mL)	% de CV
Grupo de suero 1	0,506	0,016	3,16	0,007	1,38	0,022	4,35
Grupo de suero 2	2,099	0,042	2,00	0,028	1,33	0,074	3,53
Grupo de suero 3	10,202	0,150	1,47	0,064	0,63	0,238	2,33
Grupo de plasma 1	0,495	0,016	3,23	0,004	0,81	0,023	4,65
Grupo de plasma 2	2,024	0,044	2,17	0,027	1,33	0,075	3,71
Grupo de plasma 3	10,193	0,139	1,36	0,109	1,07	0,209	2,05
Control 1	0,500	0,013	2,60	0,009	1,80	0,022	4,40
Control 2	10,121	0,132	1,30	0,103	1,02	0,241	2,38

#### Rango lineal

Entre 0,040 ng/mL y 100 ng/mL (definido por el límite de cuantificación y el límite superior de la curva principal).

#### Intervalo de notificación

Entre 0,020 ng/mL y 800 ng/mL (definido por el límite de detección y el límite superior de la curva principal × la proporción de dilución recomendada).

#### Sensibilidad analítica

Límite del blanco (LoB) = 0,010 ng/mL.

Límite de detección (LoD) = 0,020 ng/mL.

Límite de cuantificación (LoQ) = 0,040 ng/mL.

#### Especificidad analítica

#### Interferencias

La interferencia se determinó mediante el ensayo; tres muestras con distintas concentraciones de analito se enriquecieron con posibles interferencias endógenas y exógenas en un protocolo (EP7-A2) del CLSI. La desviación de la medición de la sustancia de interferencia está dentro del ±10 %. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Interferencias	Sin interferencia en niveles de hasta	Interferencias	Sin interferencia en niveles de hasta
Hemoglobina	1500 mg/dL	Furosemida	20 µg/mL
Intralipid	3400 mg/dL	Imipenem	1180 µg/mL
Bilirrubina	50 mg/dL	Noradrenalina	2 µg/mL
HAMA	40 ng/mL	Epinefrina	2 µg/mL
ANA	398 UA/mL	Vancomicina	3500 µg/mL
Factor reumatoide	3700 UI/mL	Acetaminofén	20 mg/dL
Biotina	0,5 mg/dL	Ácido acetilsalicílico	100 mg/dL
Proteína total	12 g/dL	Azitromicina	1,2 mg/dL
K2-EDTA	22,75 µmol/mL	Celecoxib	24 mg/dL
Sal sódica de heparina	40 µg/mL	Cetirizina HCl	0,36 mg/dL
Cefotaxima	900 µg/mL	Dextrometorfano	0,14 mg/dL
Dobutamina	11,2 µg/mL	Doxiciclina	51 mg/L
Dopamina	130 µg/mL	Fentanilo	11 mg/L

#### Reactividad cruzada

La reactividad cruzada se determinó a través del ensayo; tres muestras con distintas concentraciones de analito se enriquecieron con posibles reactantes cruzados en un protocolo (EP7-A2) del CLSI. La desviación de la medición de la sustancia de interferencia está dentro del ±10 %. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Reactantes cruzados	Sin interferencia en niveles de hasta	Reactantes cruzados	Sin interferencia en niveles de hasta
Katacalcina humana	60 ng/mL	Calcitonina de anguila	30 µg/mL
Calcitonina humana	60 ng/mL	α-CGRP humana	10 µg/mL
Calcitonina de salmón	30 µg/mL	β-CGRP humana	10 µg/mL

#### Efecto prozona de dosis alta

No se observó un efecto prozona de dosis alta para concentraciones de la procalcitonina (PCT) de hasta 5000 ng/mL.

#### Comparación de métodos

Una comparación del ensayo de PCT con un inmunoensayo disponible comercialmente arrojó como resultado las siguientes correlaciones (ng/mL):

Cantidad de muestras medidas: 118

Passing Bablok:  $\hat{y} = 1,0094x + 0,0006$ ,  $r = 0,991$ .

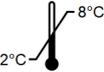
Las concentraciones de la muestra clínica estaban entre 0,039 ng/mL y 99,29 ng/mL.

#### ■ REFERENCIAS

1. Davies J. Procalcitonin[J]. Journal of Clinical Pathology, 2015, 68(9): 675–679.
2. Reith H B, Mittelkötter U, Debus E S, et al. Procalcitonin in Early Detection of Postoperative Complications[J]. Digestive Surgery, Karger Publishers, 1998, 15(3): 260–265.
3. Karzai W, Oberhoffer M, Meier-Hellmann A, et al. Procalcitonin — A new indicator of the systemic response to severe infections[J]. Infection, 1997, 25(6): 329–334.
4. Carrol E D, Thomson A P J, Hart C A. Procalcitonin as a marker of sepsis[J]. International Journal of Antimicrobial Agents, 2002, 20(1): 1–9.
5. Schneider H-G, Thanh Lam Q. Procalcitonin for the clinical laboratory: a review[J]. Pathology, 2007, 39(4): 383–390.
6. Meisner M. Update on Procalcitonin Measurements[J]. Annals of Laboratory Medicine, The Korean Society for Laboratory Medicine, 2014, 34(4): 263–273.
7. Al-Nawas B, Krammer I, Shah P. Procalcitonin in diagnosis of severe infections[J]. European journal of medical research, 1996, 1: 331–3.
8. Gendrel D, Bohuon C. Procalcitonin, a marker of bacterial infection[J]. Infection, 1997, 25(3): 133–134.
9. Schuetz P, Albrich W, Christ-Crain M, et al. Procalcitonin for guidance of antibiotic therapy[J]. Expert Review of Anti-infective Therapy, Taylor & Francis, 2010, 8(5): 575–587.
10. Schuetz P, Albrich W, Mueller B. Procalcitonin for diagnosis of infection and guide to antibiotic decisions: past, present and future[J]. BMC Medicine, 2011, 9(1): 107.

11. Schuetz P, Bretscher C, Bernasconi L, et al. Overview of procalcitonin assays and procalcitonin-guided protocols for the management of patients with infections and sepsis[J]. Expert Review of Molecular Diagnostics, Taylor & Francis, 2017, 17(6): 593–601.
12. CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions. 4th ed. CLSI guideline C24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2016.
13. Robert W. Schroff, Kenneth A. Foon, Shannon M. Beatty, et al. Human Anti-Murine Immunoglobulin Responses in Patients Receiving Monoclonal Antibody Therapy[J]. Cancer Research, 1985, 45(2):879-85.
14. Primus F J, Kelley E A, Hansen H J, et al. "Sandwich"-type immunoassay of carcinoembryonic antigen in patients receiving murine monoclonal antibodies for diagnosis and therapy[J]. Clinical Chemistry, 1988, 34(2):261-264.
15. Boscato L M , Stuart M C . Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. Clin Chem 1988;34(1):27-33.

#### ■ EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

	Consulte las instrucciones de uso		Fabricante
	Límite de temperatura (Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C)		Fecha de caducidad
	Contiene suficiente para <n> pruebas		Mantener alejado de la luz solar
	Este lado hacia arriba		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Componentes del kit
	Número de catálogo		Código de lote
	Marcado CE		

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



#### Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China  
Tel.: +86-755-21536601 Fax: +86-755-28292740



#### Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726