

MAGLUMI® Iniciador 1+2

■ USO PREVISTO

El Iniciador 1+2 se usa para desencadenar la reacción de quimioluminiscencia para producir la señal lumínica, y se usa junto con los reactivos del ensayo MAGLUMI en el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie MAGLUMI y el Sistema integrado de la serie Biolumi.

■ RESUMEN


El Iniciador 1 proporciona el ambiente alcalino y después el Iniciador 2 activa el ABEI (N-(4-Aminobutil)-N-etilisoluminol) para producir la señal lumínica, que será capturada por el analizador.

■ MATERIALES SUMINISTRADOS

REF	Descripción	Especificaciones
130299004M	NaOH al 1,5 % (Iniciador 1)	Iniciador 1: 1×230 ml Iniciador 2: 1×230 ml
130299027M	H ₂ O ₂ al 0,18 % (Iniciador 2)	Iniciador 1: 1×1,5 l Iniciador 2: 1×1,5 l

■ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.
- Siga las precauciones normales requeridas para manipular todos los reactivos de laboratorio.
- Evite la ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Si, lamentablemente, sucede, beba o lave la zona con abundante agua y busque atención médica de emergencia.
- Todos los residuos deben considerarse potencialmente infecciosos y deben desecharse de acuerdo con las directrices locales.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles a pedido.
- Nota: Si ha ocurrido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que usted se encuentre.
- De conformidad con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP), los reactivos peligrosos se clasifican y etiquetan como se muestra a continuación:

REACTIVOS:	Iniciador 1
CLASIFICACIÓN:	Irritante cutáneo, Categoría 2
PALABRA CLAVE:	Advertencia
SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS:	 GHS07 signo de exclamación
DECLARACIONES DE RIESGO:	H315 Provoca irritación cutánea.
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:	P264: Lávese bien las manos después de la manipulación. P280: Utilice guantes/ropa de protección. P362+P364: Qúitese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
CONTIENE: (solo las sustancias prescritas conforme al Artículo 18 del Reglamento CE 1272/2008).	Hidróxido de sodio; soda cáustica (Iniciador 1)

PROCEDIMIENTO

Materiales suministrados

Iniciador 1 + 2

Materiales necesarios (pero no suministrados)

130299004M: Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus, MAGLUMI X3 y Biolumi 8000.

130299027M: MAGLUMI X8, MAGLUMI X6 y Biolumi CX8.

Manipulación












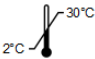


Cuando se reemplacen los reactivos iniciadores, siga el procedimiento descrito en el Manual del operador.

- Coloque el Iniciador 1 y el Iniciador 2 en la posición de carga en "1" y "2". Para evitar confusiones, los tubos de los reactivos iniciadores están marcados. La colocación correcta es absolutamente esencial.
- No sacuda los tubos violentamente para evitar la formación de burbujas.
- Siempre cierre la tapa de los iniciadores después de cargar los reactivos.
- Nunca deje abiertos los viales del reactivo iniciador.
- No cambie las tapas de los viales 1 y 2 del reactivo iniciador.
- Para obtener más información, consulte el Manual del operador correspondiente.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Sin abrir, a 2-30 °C: hasta la fecha de caducidad que se indica en las etiquetas.
- Abierto, a 2-30 °C: 45 días.
- Estabilidad en el sistema: 4 semanas.
- Se debe mantener alejado de la luz solar directa.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS


	Consulte las instrucciones de uso		Fabricante
	Límite de temperatura (Almacenar a 2-30 °C)		Mantener alejado de la luz solar
	Número de catálogo		Fecha de caducidad
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Componentes del kit
	Marcado CE		Este lado hacia arriba
	Identificador único del dispositivo		Importador

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

No.23, Jinxu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China
Tel.: +86-755-21536601 Fax: +86-755-28292740

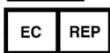

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726