

# MAGLUMI<sup>®</sup> Concentrado de lavado

## ■ USO PREVISTO

El Concentrado de lavado se usa para extraer sustancias que potencialmente interfieren en la detección de las señales y se usa junto con los reactivos del ensayo MAGLUMI en el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie MAGLUMI y el Sistema integrado de la serie Biolumi.

## ■ RESUMEN

El Concentrado de lavado se diluirá hasta la concentración de trabajo antes del uso. El Concentrado de lavado diluido se usa para extraer las sustancias no unidas y lavar las agujas cuando se llevan a cabo los ensayos MAGLUMI.

## ■ MATERIALES SUMINISTRADOS

REF	Descripción	Especificaciones
130299005M	Solución amortiguadora Tris-HCl	1x714 ml
130299035M		1x10 l
El Concentrado de lavado debe diluirse antes del uso.		

## ■ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.
- Siga las precauciones normales requeridas para manipular todos los reactivos de laboratorio.
- Evite la ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Si, lamentablemente, sucede, beba o lave la zona con abundante agua y busque atención médica de emergencia.
- Todos los residuos deben considerarse potencialmente infecciosos y deben desecharse de acuerdo con las directrices locales.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles a pedido.
- Nota: Si ha ocurrido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que usted se encuentre.

## ■ PROCEDIMIENTO

### Materiales suministrados

Concentrado de lavado.

### Materiales necesarios (pero no suministrados)

Analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus, MAGLUMI X3, MAGLUMI X6, MAGLUMI X8, o Sistema integrado Biolumi 8000 y Biolumi CX8.

### Manipulación

#### 1x714 ml:

- Añada un frasco de Concentrado de lavado al recipiente.
- Llene el recipiente con agua purificada lentamente hasta la marca de 10 litros.
- Mezcle el líquido despacio, evite la formación de burbujas.

#### 1x10 l:

- El Concentrado de lavado y el agua purificada se conectan a la Estación de lavado.
- Para obtener más detalles, consulte el manual de la Estación de lavado.












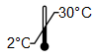


### ■ ENJUAGUE DEL RECIPIENTE

- Limpie el recipiente con agua purificada cada vez que cambie el Concentrado de lavado.
- Se recomienda usar una solución de hipoclorito de sodio con un contenido de cloro disponible de 0.05%-0.1% (o 500 mg/L-1000 mg/L) para enjuagar el depósito cada mes.
  - Deseche el líquido residual antes de limpiar el recipiente.
  - Agregue 2 L de solución de hipoclorito de sodio con un contenido de cloro disponible de 0.05%-0.1% (o 500 mg/L-1000 mg/L) en el depósito.
  - Cierre el recipiente y agítelo de adelante hacia atrás, después déjelo reposar durante 30 minutos.
  - Vacíe el recipiente y enjuáguelo más de tres veces con agua purificada (2 l cada vez).

### ■ ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Sin abrir, a 2-30 °C: hasta la fecha de caducidad que se indica en las etiquetas.
- Abierto, a 2-30 °C:
  - Para 1x714 ml: 4 semanas después de la dilución.
  - Para 1x10 l: 3 meses.
- Proteja de la exposición directa a la luz solar.

### ■ EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

	Consulte las instrucciones de uso		Fabricante
	Límite de temperatura (almacenar a 2-30 °C)		Mantener alejado de la luz solar
	Número de catálogo		Fecha de caducidad
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Componentes del kit
	Marcado CE		Este lado hacia arriba
	Identificador único del dispositivo		Importador

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



**Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.**

No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China

Tel.: +86-755-21536601

Fax: +86-755-28292740



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726