

# MAGLUMI® Vaso de reacción

## ■ USO PREVISTO

El Vaso de reacción es un accesorio para IVD diseñado para usarse con el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie MAGLUMI y el Sistema integrado de la serie Biolumi.

## ■ RESUMEN

El Vaso de reacción es como el recipiente de reacción cuando el ensayo MAGLUMI analiza las muestras. El Vaso de reacción se cargará en el cajón de almacenamiento de la cubeta del sistema.

## ■ MATERIALES SUMINISTRADOS

REF	Descripción	Especificaciones
130105000101	Polipropileno	546 vasos/caja

## ■ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.
- No reutilice el producto.
- La eliminación de todos los desechos deberá realizarse conforme a las directrices locales.
- Nota: Si ha ocurrido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que usted se encuentre.

## ■ PROCEDIMIENTO

### Materiales suministrados

Vaso de reacción.

### Materiales necesarios (pero no suministrados)

Analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático MAGLUMI X8, MAGLUMI X3 y MAGLUMI X6 o Sistema integrado Biolumi CX8.



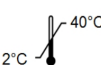

### Procedimiento de carga











- MAGLUMI X8 y Biolumi CX8 pueden alojar un máximo de 16×182 vasos de reacción en el almacenamiento de la cubeta.
- MAGLUMI X3 puede alojar un máximo de 2×182 vasos de reacción en el almacenamiento de la cubeta.
- MAGLUMI X6 puede alojar un máximo de 11×182 vasos de reacción en el almacenamiento de la cubeta.
- Para obtener más información, consulte el Manual del operador correspondiente.

## ■ ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Sin abrir, a 2-40 °C hasta la fecha de caducidad que se indica en las etiquetas.
- Proteja de la exposición directa a la luz solar.
- Después del uso, vuelva a sellar la caja para proteger el Vaso de reacción de la contaminación.

## ■ EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

	Consulte las instrucciones de uso		Fabricante
	Límite de temperatura (Almacenar a 2-40 °C)		Mantener alejado de la luz solar

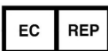
	Número de catálogo		Fecha de caducidad
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Componentes del kit
	Marcado CE		No reutilizar
	Importador		Identificador único del dispositivo

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



**Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.**

No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China  
 Tel.: +86-755-21536601 Fax: +86-755-28292740



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
 Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726