

MAGLUMI® Tip

■ USO PREVISTO

La Punta es un accesorio para IVD diseñado para usarse con el analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático de la serie MAGLUMI y el Sistema Integrado de la serie Biolumi.

■ RESUMEN

La Punta se usa para transferir muestras cuando se hacen pruebas con el ensayo MAGLUMI. La Punta se cargará en el cajón de almacenamiento de la punta del sistema.

■ MATERIALES SUMINISTRADOS

REF	Descripción	Especificaciones
130208000201	Polipropileno	20 × 192 puntas

■ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para uso en el diagnóstico *in vitro*.
- Solo para uso profesional.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta.
- No reutilice el producto.
- La eliminación de todos los desechos deberá realizarse conforme a las directrices locales.
- Nota: Si ha ocurrido algún incidente grave en relación con el dispositivo, informe a Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) o a nuestro representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted se encuentre.

■ PROCEDIMIENTO

Materiales suministrados

Punta.

Materiales necesarios (pero no suministrados)

Analizador para inmunoensayo de quimioluminiscencia completamente automático MAGLUMI X8, MAGLUMI X6 o Sistema Integrado Biolumi CX8.

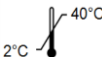
Procedimiento de carga

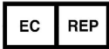
- Abra el cajón de almacenamiento de puntas.
- Coloque las puntas en el almacenamiento según el manual de operación del producto del analizador correspondiente.
- Cierre el cajón de almacenamiento de puntas.

■ ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Sin abrir a una temperatura de entre 2 y 40°C, hasta la fecha de caducidad que se indica en las etiquetas.
- Proteja de la exposición directa a la luz solar.
- Después del uso, vuelva a sellar la caja para proteger las puntas de la contaminación.

■ EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

	Consulte las instrucciones de uso		Fabricante
	Límite de temperatura (Almacenar a una temperatura de entre 2 y 40 °C)		Mantener alejado de la luz solar

	Número de catálogo		Fecha de caducidad
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea		Componentes del kit
	Marcado CE		Este lado hacia arriba
	No reutilizar		Identificador único del dispositivo
	Importador		

MAGLUMI® y Biolumi® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
 No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China
 Tel.: +86-755-21536601 Fax: +86-755-28292740



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
 Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726